

Crozz three 2G 650

Gemotoriseerde Sedatiewagen



YouTube video



Jansen
medicars

Crozz three 2G 650 – Modulaire Sedatiewagen

De **Crozz three 2G 650** is een robuuste en uiterst wendbare medische apparatenwagen die is gebaseerd op een **modulair concept**. De wagen is speciaal ontwikkeld als mobiele werkplek, waarbij naast een werkblad ook apparatuur en werkvoorraden nodig zijn. Deze apparatenwagen combineert maximale veiligheid, optimale ergonomie en geavanceerde technologie in één compacte oplossing.

Eén van de toepassingsgebieden waar deze apparatenwagen veel wordt ingezet, is **sedatie**. Dankzij onze jarenlange ervaring als fabrikant van sedatiewagens hebben wij met de Crozz three een solide basis ontwikkeld waarin gebruikerservaringen en de nieuwste medische ontwikkelingen zijn verwerkt. Met honderden beschikbare accessoires kan de wagen bovendien volledig worden aangepast aan de specifieke behoeften van jouw afdeling en protocollen.

Modulair concept

Het compacte en modulaire ontwerp van de Crozz three 2G 650 stelt u in staat om de wagen volledig af te stemmen op uw gebruik, met een nadruk op ergonomie en gebruiksgemak. Een breed scala aan accessoires is beschikbaar om u de trolley geheel op uw behoeften samen te stellen.

Makkelijk te verplaatsen

De 125mm dubbelrol zwenkwielen bieden uitstekend comfort en wendbaarheid. De twee voorste zwenkwielen zijn uitgerust met een rem die zorgt voor een stabiele positionering tijdens gebruik. Het rempedaal kan eenvoudig worden ontgrendeld, zelfs met medische klompen aan.

Elektrische veiligheid

De Crozz three 2G 650 is uitgerust met 12 stopcontacten met potentiaalvereffeningsconnectoren, die zijn geïntegreerd in het zijpaneel. Dit maakt het eenvoudig om medische apparaten aan te sluiten met korte kabels. Het geïntegreerde kabelmanagementsysteem, bestaande uit kabelkanalen en -geleiders aan de achterzijde van de plateaus, zorgt ervoor dat alle bekabeling netjes is weggewerkt. Dit resulteert in een opgeruimde en eenvoudig te reinigen constructie. De wagen is ook voorzien van een centrale hoofdschakelaar en een optionele medische scheidingstransformator.

Mechanische veiligheid

Mechanische stabiliteit is cruciaal voor veilig gebruik, zeker bij de inzet van monitorarmen. Elke configuratie op basis van de Crozz three 2G 650 voldoet aan alle stabiliteitseisen van de huidige NEN/EN/IEC 60601-1-norm. Indien gewenst kan een stabiliteitsberekening worden verstrekt.

Normen en registratie

De trolley voldoet aan de vigerende **NEN/EN/IEC 60601-1** en is **MDR klasse I** geregistreerd.




Werkblad met verlichting




Opstand met kantelbakjes



12 stopcontacten met EQP

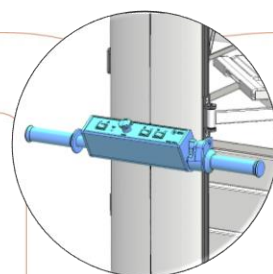

Motor Drive besturing

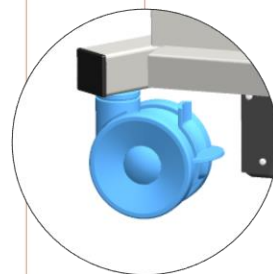

Wiel met schoprem

De Crozz Three 2G 650: Een Modulaire Oplossing voor Veilige Sedatie

De Crozz three 2G 650 is een robuuste en uiterst wendbare medische apparatenwagen, gebaseerd op een modulaair concept. De wagen is speciaal ontwikkeld als een mobiele werkplek waar zowel apparatuur als werkvoorraden efficiënt kunnen worden georganiseerd. De Crozz three combineert maximale veiligheid, optimale ergonomie en geavanceerde technologie in één compacte oplossing.

Eén van de belangrijkste toepassingsgebieden waar de Crozz three 2G 650 wordt ingezet, is sedatie. Door onze jarenlange ervaring als fabrikant hebben wij een solide basis gecreëerd waarin de feedback van gebruikers en de nieuwste medische ontwikkelingen zijn verwerkt. Met honderden beschikbare accessoires kan de wagen bovendien volledig worden aangepast aan de specifieke behoeften van uw afdeling en protocollen.

Samenstellen van de Ideale Sedatiewagen: Aandachtspunten

Om een veilige en efficiënte sedatiewagen samen te stellen, is het essentieel om zorgvuldig te overwegen hoe apparatuur en werkvoorraden worden georganiseerd. De Crozz three 2G 650 biedt met zijn modulaire ontwerp en brede scala aan accessoires de flexibiliteit om de wagen volledig af te stemmen op uw workflow. Hieronder vindt u de belangrijkste aspecten en mogelijkheden bij het configureren van een sedatiewagen:

Opslag van werkvoorraden

Om werkvoorraden efficiënt te organiseren, kunnen meerdere laden worden geplaatst van verschillende hoogtes. Met de beschikbare ladeverdelers creëert u een overzichtelijke indeling die volledig naar wens kan worden geconfigureerd. Voor kleinmateriaal zijn er kantelbakjes die in de opstand boven het werkblad geplaatst kunnen worden. Deze transparante bakjes bieden een direct overzicht van de voorraad. De bakjes zijn bovendien eenvoudig uitneembaar en te reinigen, wat bijdraagt aan een optimale hygiëne.

Opslag van medicatie

In een sedatiewagen wordt doorgaans ook medicatie, waaronder opiaten, opgeslagen. Om dit conform de regelgeving te doen, kunnen één of meerdere lades worden voorzien van een elektronisch codeslot. Dit waarborgt de veilige opslag en beperkt de toegang tot geautoriseerd personeel.

Voorbereiden van medicatie

Voor het klaarleggen van medicatie wordt vaak een **Q-check** gebruikt. Speciaal hiervoor is een houder op een zwenkarm beschikbaar, die het mogelijk maakt de Q-check boven het werkblad te positioneren. Dit houdt het werkblad vrij en maakt de medicatie gemakkelijker bereikbaar.

Plaatsing van apparatuur en ergonomie

Voor een goede afleesbaarheid en eenvoudige bediening kan de **patiëntenmonitor** het beste hoog op de trolley worden geplaatst. Voor de verwerking van gegevens kan een **PanelPC**, waarin de computer in het beeldscherm is geïntegreerd, op een in hoogte verstelbare monitorarm worden bevestigd. Dit zorgt voor een ergonomische werkplek. Voor het bevestigen van apparatuur zoals **spuitenpompen**, **vacuumpomp** of **labelprinter** zijn er diverse montagepunten beschikbaar.

Afzuigstelsysteem

Voor het afzuigen van o.a. slijm wordt een afzuigstelsysteem met vacuümpomp en afzuigpotten op de trolley gemonteerd. De potten kunnen aan DIN-rails aan de buitenzijde van de trolley worden bevestigd. Deze rails zijn aan de buitenzijde van de wagen bevestigd, zodat bij eventuele lekkages de binnenkant van de wagen schoon en droog blijft.

Gascilinders

Voor de beademing worden gascilinders (meestal 2 of 5 liter) laag aan de zijkant van de trolley geplaatst met behulp van speciale cilinderhouders. Dit garandeert een veilige en stabiele bevestiging en draagt bij aan een optimale gewichtsverdeling.

Gemotoriseerde aandrijving (Motor Drive)

Aangezien sedatiewagens door het hele ziekenhuis worden verplaatst en vaak zwaar beladen zijn, is de optionele elektrische aandrijving een belangrijke functionaliteit. De motor drive vermindert de fysieke belasting van het personeel aanzienlijk en zorgt ervoor dat de wagen gemakkelijk en wendbaar kan worden gemanoeuvreerd.

Veel gebruikte accessoires



Montage patiënten monitor

S18.60.00 – Countertop Philips
R07.43.00 – Handgreep




Laden

S65.56.00 – Lade 650x450x90mm
S65.50.00 – Lade 650x450x150mm
S65.57.00 – Lade 650x450x210mm
S65.53.00 – Lade voor transformator




Digitaal codeslot

S03.03.00 – Codeslot voor lade

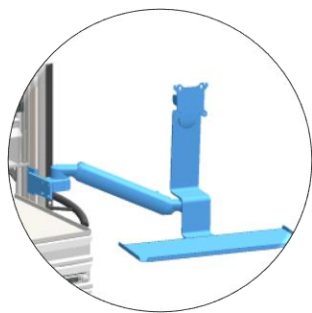

Monitor arm

S18.45.00 – Hoogte verstelbare arm met keyboard plateau

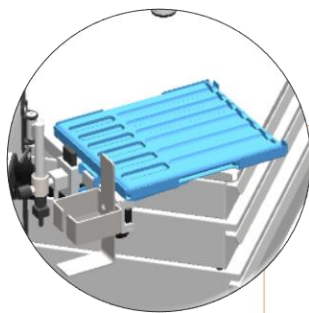


Q-check houder op DIN rail

S17.70.00 – DIN-rail op draaipunt
R07.66.00 – Q-Check houder




Serumhouder

S17.83.00 – Serumhouder

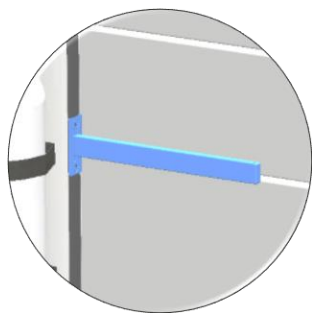

DIN rail

S16.10.00 – DIN rail 25x10

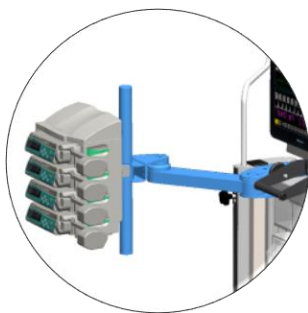


Zwenkarm voor pompen

R07.65.01 – Zwenkarm met 38mm
inpuuspaaal




Flessenbeugels

F16.94.00 – Gasfleshouder 2x 2 liter
F16.93.00 – Gasfleshouder 2 liter
F16.87.00 – Gasfleshouder 4-10 liter

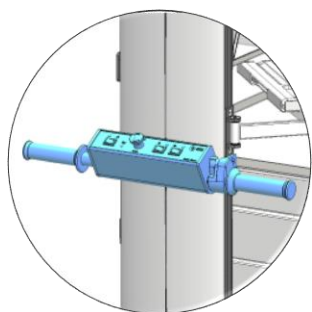

Motor Drive


F16.87.00 – 140 mm 5...10 L

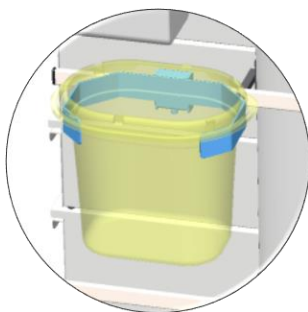

Houder voor naaldenemmer

S16.81.06 – Sharpsafe 4 en 7 liter
S16.81.08 – BD Sharps 3 liter
S16.81.09 – BD Sharps 5 en 7 liter

>> Meer modellen beschikbaar

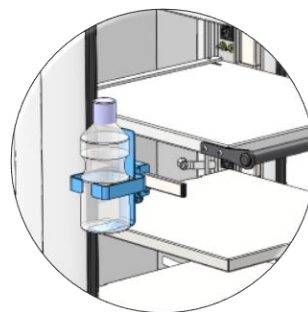

Waterfles houder

S16.91.00 – Waterfleshouder voor
DIN-Rail montage

Meer accessoires

De accessoires die in deze brochure worden getoond, vormen slechts een greep uit ons uitgebreide aanbod. Onze kracht ligt in het samenstellen van de perfecte sedatiewagen voor uw specifieke workflow en wensen.

Vindt u niet direct wat u zoekt? Neem dan contact met ons op. Onze experts denken graag met u mee en vinden vrijwel altijd een passende oplossing binnen ons modulaire concept. Mocht het nodig zijn, dan ontwikkelen wij zelfs een maatwerkoplossing die naadloos aansluit op uw behoeften.